



PYONEX


Micro agulhas esterilizadas, semi-permanentes, disponíveis em cápsulas individuais que permitem evitar o contato entre a agulha e os dedos. Com cinco medidas diferentes, codificadas por cores. Podem ser usadas nos pontos auriculares e nos pontos do corpo. Seguras, higiénicas e muito fáceis de manusear. O adesivo garante uma aplicação suave e uma fixação exata e duradoura. A estimulação ocorre pressionando com o dedo sobre o ponto de pressão, bem palpável sob o adesivo. Aplicação:

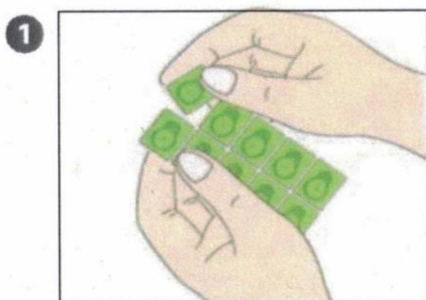


1 Corte uma cápsula esterilizada pelo picotado.

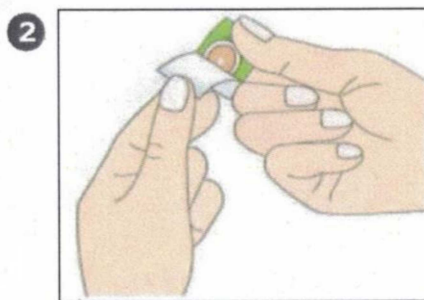


2 Abra a cápsula.

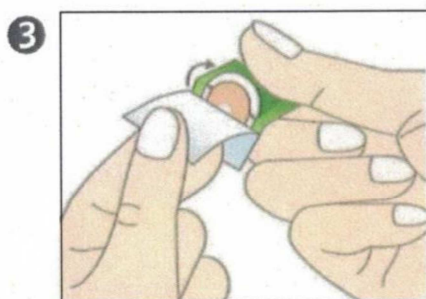


3 Dobre ligeiramente a cápsula.

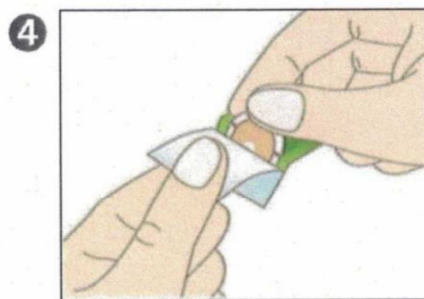

4 Segure a fita e o papel protetor em forma circular, entre os dedos e remova parcialmente.

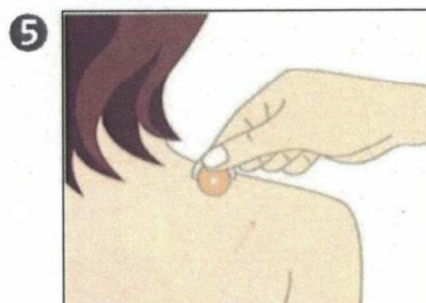

5 Desinfete a área a tratar com álcool. Aplique o adesivo diretamente na pele ainda com o papel protetor.

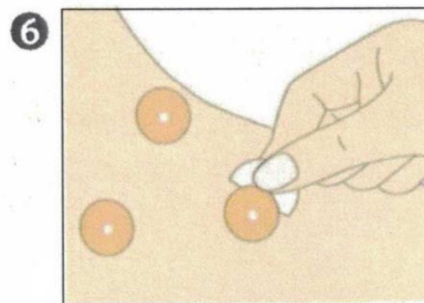

6 Depois de aplicado, retire o papel protetor. Pressione o adesivo por cima para se certificar de que a agulha foi inserida corretamente na pele.